

Prawidłowe umieszczenie w wózku inwalidzkim



ANYONEGO^o.


Szczegółowe filmiki instruktażowe są dostępne na stronie www.anyonego.com (w języku angielskim)

Wózek składa się z dwóch części.


1 Odpinana część piersiowa z tylną zakładką.




2 Rama wózka z siedziskiem i kółkami.

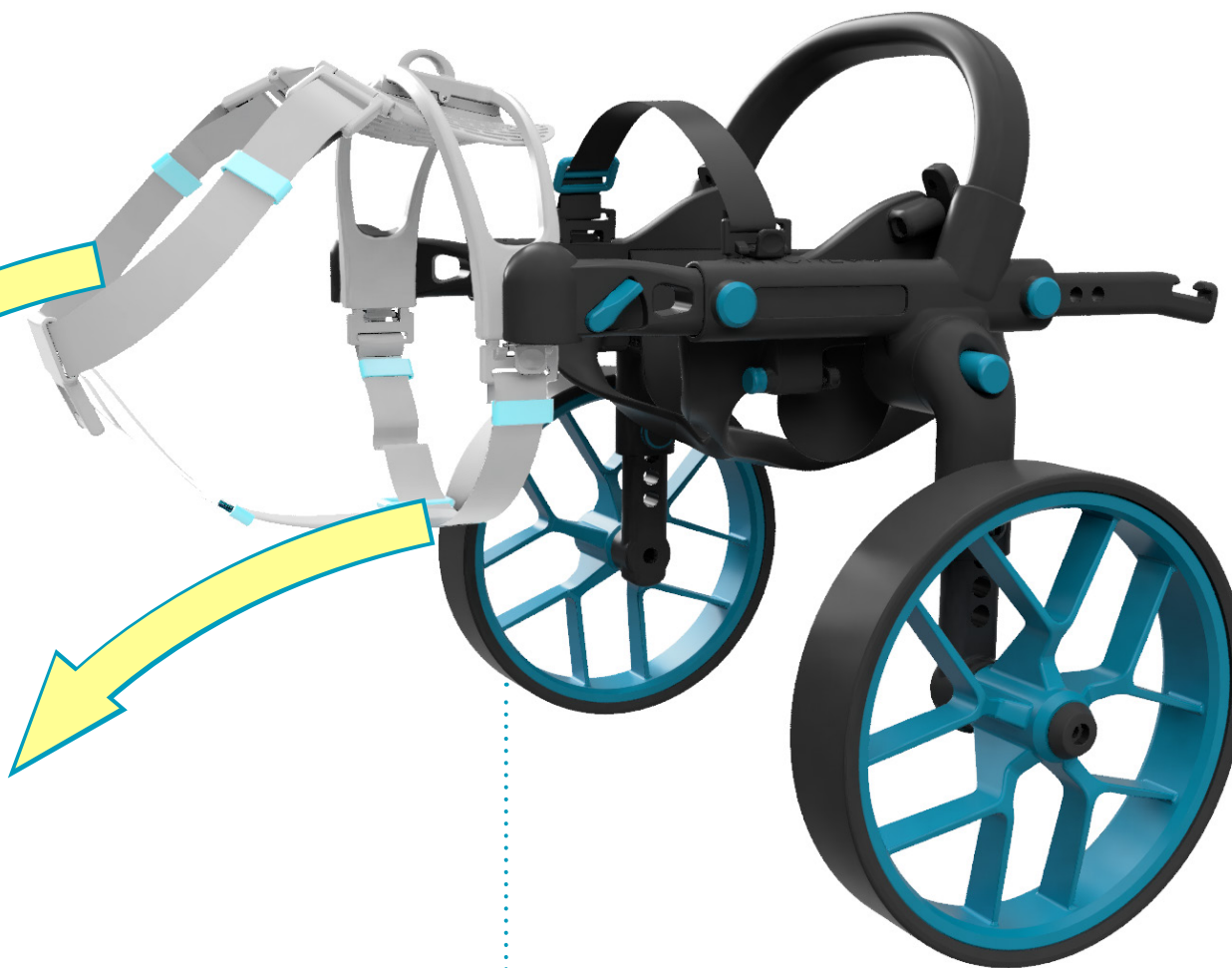

Włóż część piersiową przez głowę psa.

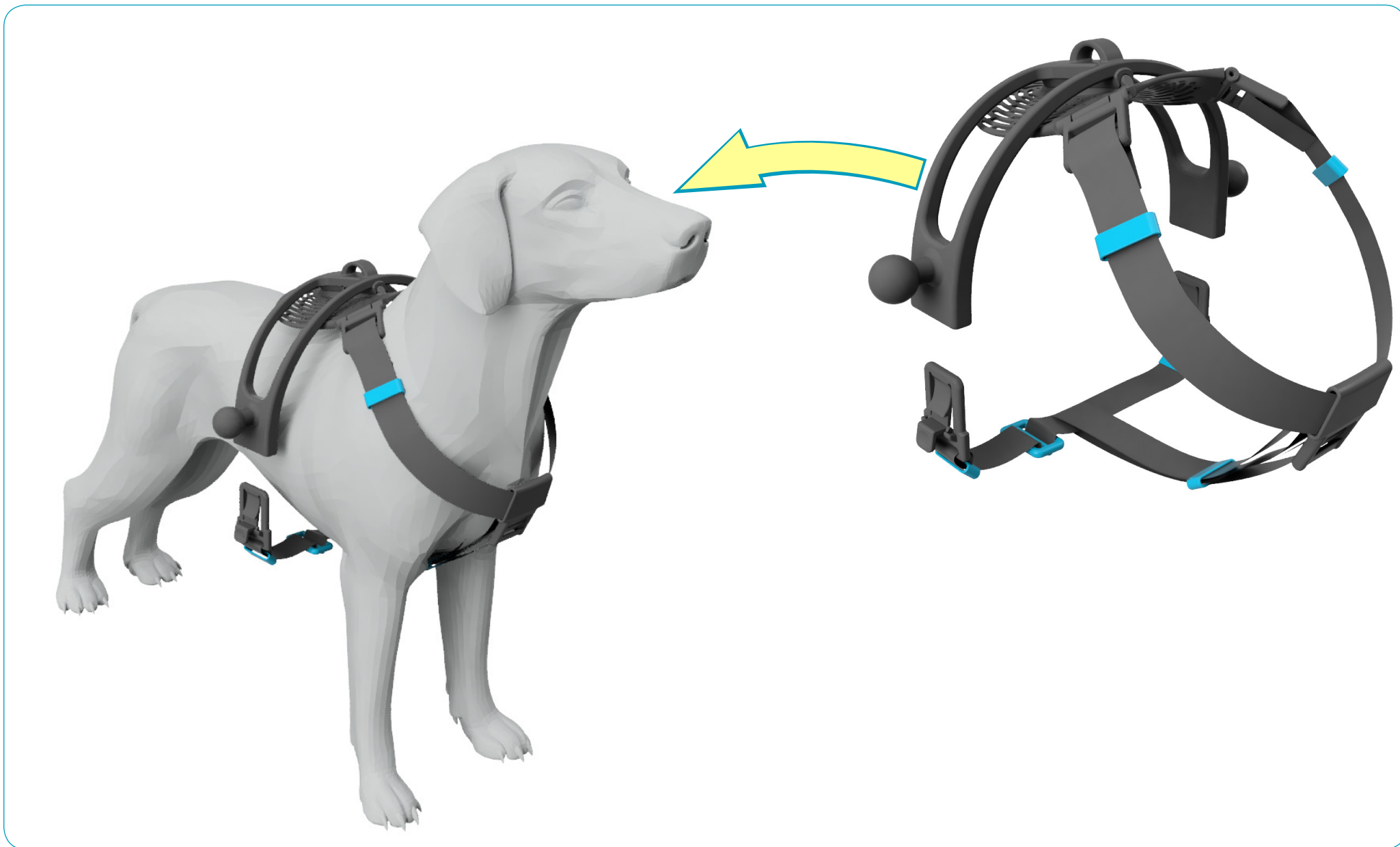


Wyreguluj szelki.

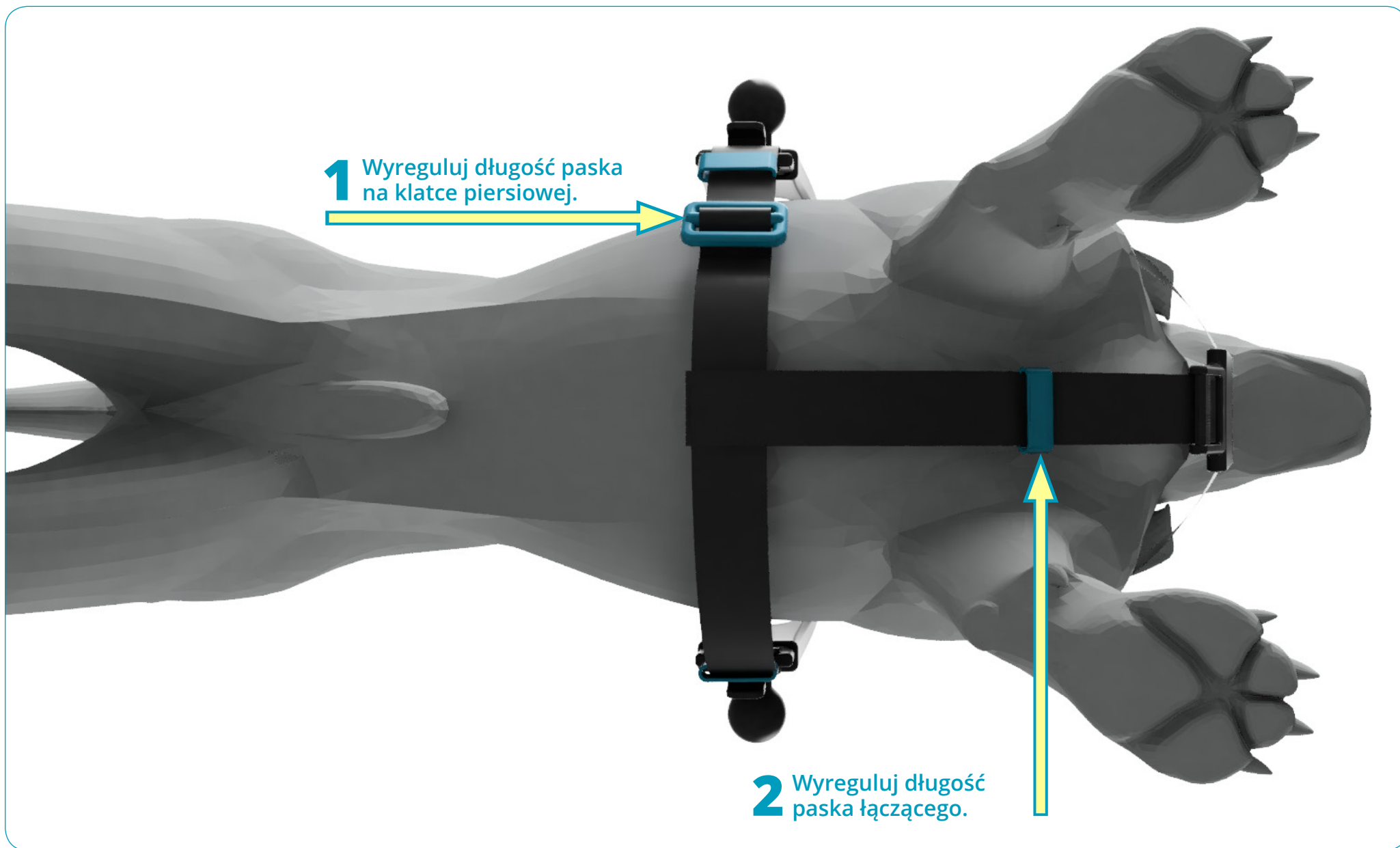

Prawidłowo założona i wyregulowana część piersiowa.



Szerokość siodełka wózka w części miednicowej można dopasować za pomocą przestawnych boków siodełka.

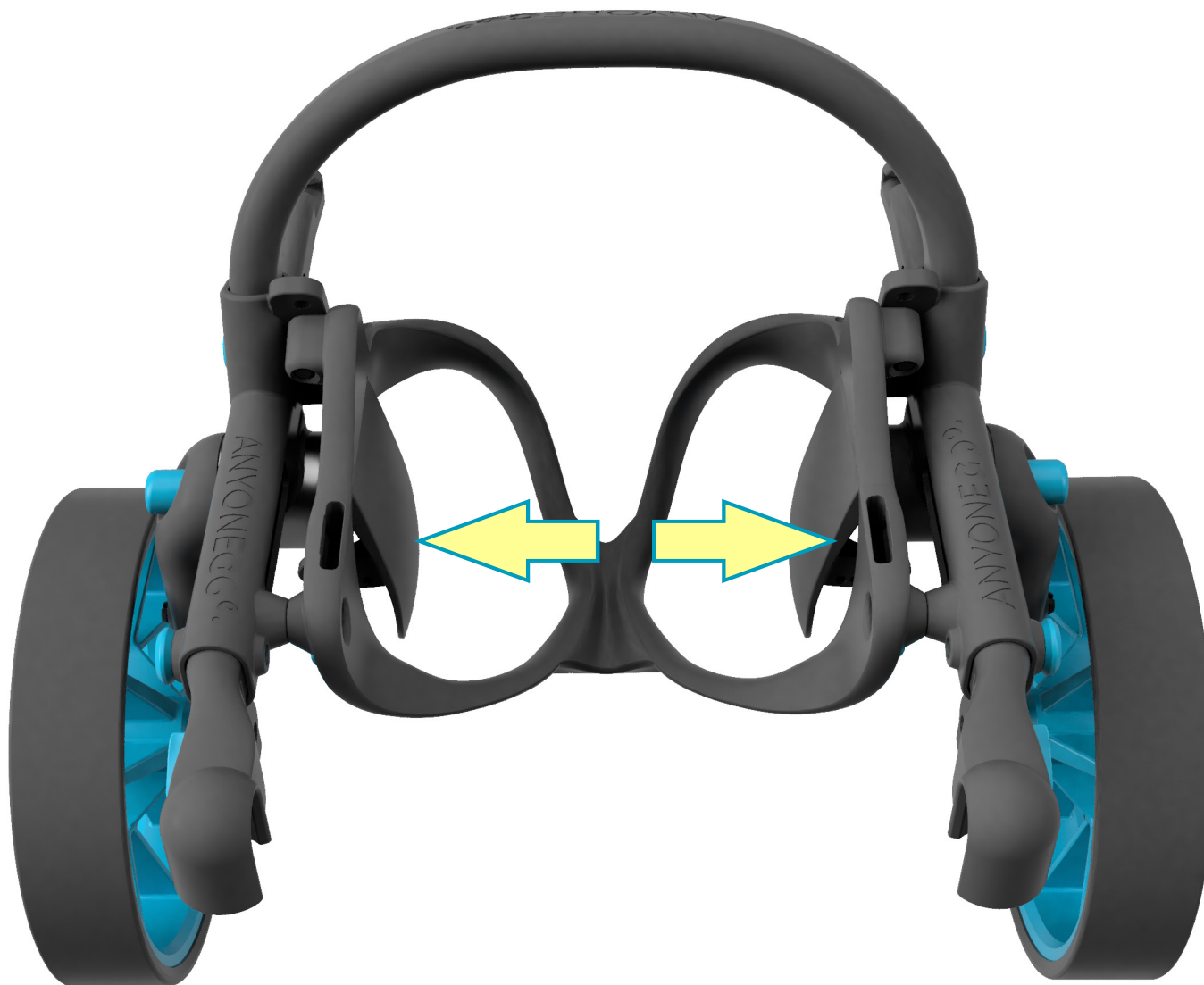

Wyciągnij dwa kołki znajdujące się z przodu po bokach siodełka.



Teraz umieść psa w wózku i zatrzaśnij końce bocznych prętów ramy na dół na przeguby kulowe części piersiowej.



Ustaw boki w wymaganej pozycji zgodnie z miednicą i zabezpiecz kółkami.



W razie potrzeby dopasuj długość wózka za pomocą bocznych prętów ramy wózka i wysokość za pomocą pionowego zawieszenia kół.

